

Test sangue occulto umano nelle feci

Istruzioni per la corretta esecuzione del prelievo di feci

FARMACA SRL

Laboratori Di Analisi E Ricerca
C.so Marengo, N°49
15067 – Novi Ligure (AL)
Italia

Tel./Fax +39 0143.380175

E-mail: info@farmacalab.it

COMPOSIZIONE DEL KIT

- 1 contenitore per la raccolta delle feci
- 1 bustina trasparente
- 1 etichetta
- 1 libretto di istruzioni per l'uso

ISTRUZIONI PER L'ESECUZIONE DEL PRELIEVO E LA SPEDIZIONE DEL CAMPIONE AL LABORATORIO

Effettuare la raccolta possibilmente al mattino del giorno in cui il campione verrà consegnato al laboratorio o al massimo il pomeriggio precedente avendo l'accortezza di conservare il campione in frigorifero. Non effettuare la raccolta del campione durante o entro 3 giorni del ciclo mestruale o se il paziente soffre di emorroidi sanguinanti o presenta sangue nell'urina. Alcol, aspirina e altri medicinali assunti in eccesso possono causare irritazione gastrointestinale che provocano sanguinamento occulto. Queste sostanze dovrebbero essere sospese almeno 48 ore prima del test.

1. Scrivere Nome/Cognome e data del prelievo sull'etichetta e attaccarla sul contenitore. La corretta identificazione del campione è fondamentale per l'identificazione in laboratorio.



2. Emettere le feci su una superficie asciutta e pulita (vaso di raccolta, catino, oppure disponendo uno strato di carta igienica nel WC in modo da trattenere le feci per il tempo necessario ad eseguire il prelievo).

3. Raccogliere con la paletta del contenitore un quantitativo di feci delle dimensioni di una noce nel caso di feci formate o per un terzo del volume nel caso di feci liquide o scomposte (non riempire completamente il contenitore).

4. Dopo aver riempito il contenitore chiuderla col tappo a vite e inserire il campione nella bustina trasparente e conservare in frigorifero a una temperatura di 4°C.

5. Chiamare il numero di telefono **0143.380175** per il ritiro dei campioni oppure spedire i campioni, secondo le istruzioni del fornitore.

USO PREVISTO

Il presente dispositivo medico-diagnostico in vitro deve essere utilizzato esclusivamente per eseguire il prelievo di feci per effettuare il test "Test sangue occulto umano nelle feci" così come definito dal presente foglietto illustrativo.

Ogni altro utilizzo è da ritenersi vietato. La ditta FARMACA SRL non si farà carico di eventuali responsabilità per utilizzi non consentiti nel presente foglio di istruzioni d'uso.

PRECAUZIONI

Non usare il kit oltre la data di scadenza. La scadenza è indicata nell'etichetta posta sul retro della confezione. Tutti i campioni prelevati dai pazienti devono essere debitamente smaltiti. FARMACA SRL si occuperà personalmente dello smaltimento dei rifiuti sanitari, adottando le precauzioni standard normalmente osservate per le sostanze costituenti pericolo microbiologico. Se si hanno dubbi riguardanti l'utilizzo del presente kit di prelievo, contattare immediatamente FARMACA SRL-Laboratori Di Analisi E Ricerca (Tel. +39 0143.380175).

Il presente dispositivo non può essere riutilizzato. Conservare a temperatura ambiente, in luogo asciutto protetto dai raggi solari. L'integrità delle confezioni e dei componenti del kit garantisce la loro sterilità. Le confezioni del kit devono essere aperte solo immediatamente prima del loro utilizzo.