



KIT DI PRELIEVO CAPILLARE UNIVERSALE

## TEST HELICOBACTER PYLORI CARD

Istruzioni per la corretta esecuzione del prelievo feci

### FARMACA SRL

Laboratori Di Analisi E Ricerca  
C.so Marengo, N°49  
15067 – Novi Ligure (AL)  
Italia

Tel./Fax +39 0143.72.206

E-mail: info@farmacalab.it

### COMPOSIZIONE DEL KIT

- 1 provetta per la raccolta delle feci
- 1 bustina trasparente
- 1 etichetta
- 1 libretto di istruzioni per l'uso

### ISTRUZIONI PER L'ESECUZIONE DEL PRELIEVO E LA SPEDIZIONE DEL CAMPIONE AL LABORATORIO

1. Scrivere Nome/Cognome e data del prelievo sull'etichetta e attaccarla sulla provetta. La corretta identificazione del campione è fondamentale per l'identificazione in laboratorio.

2. Emettere le feci su una superficie asciutta e pulita (vaso di raccolta, catino, oppure disponendo uno strato di carta igienica nel WC in modo da trattenere le feci per il tempo necessario ad eseguire il prelievo).

3. Raccogliere con la paletta del contenitore un quantitativo di feci delle dimensioni di una noce nel caso di feci formate o per un terzo del volume del contenitore nel caso di feci liquide o scomposte (non riempire completamente il contenitore).

4. Dopo aver riempito la provetta chiuderla col tappo a vite e inserire il campione nella bustina trasparente e conservare in frigorifero a una temperatura di 4°C.

5. Per il ritiro dei campioni chiamare il numero di telefono 0143.72.206 oppure spedire i campioni, tassativamente a temperatura refrigerata, secondo le istruzioni del fornitore.

### USO PREVISTO

Il presente dispositivo medico-diagnostico in vitro deve essere utilizzato esclusivamente per eseguire il prelievo capillare per effettuare il "Test Helicobacter pylori card", così come definito dal presente foglietto illustrativo.

Ogni altro utilizzo è da ritenersi vietato. La ditta FARMACA SRL non si farà carico di eventuali responsabilità per utilizzi non consentiti nel presente foglio di istruzioni d'uso.

### PRECAUZIONI

Non usare il kit oltre la data di scadenza. La scadenza è indicata nell'etichetta posta sul retro della confezione. Tutti i campioni prelevati dai pazienti devono essere debitamente smaltiti. FARMACA SRL si occuperà personalmente dello smaltimento dei rifiuti sanitari, adottando le precauzioni standard normalmente osservate per le sostanze costituenti pericolo microbiologico. Se si hanno dubbi riguardanti l'utilizzo del presente kit di prelievo, contattare immediatamente FARMACA SRL-Laboratori Di Analisi E Ricerca (Tel. +39 0143.72.206).

Il presente dispositivo non può essere riutilizzato. Conservare a temperatura ambiente, in luogo asciutto protetto dai raggi solari. L'integrità delle confezioni e dei componenti del kit garantisce la loro sterilità. Le confezioni del kit devono essere aperte solo immediatamente prima del loro utilizzo.