



KIT DI PRELIEVO SALIVARE UNIVERSALE

## SALIVARY DHEA ELISA

Istruzioni per la corretta esecuzione del prelievo salivare

### FARMACA SRL

Laboratori Di Analisi E Ricerca  
C.so Marengo, N°49  
15067 – Novi Ligure (AL)  
Italia

Tel./Fax +39 0143.72.206

E-mail: info@farmacalab.it

### COMPOSIZIONE DEL KIT

- 1 provetta per la raccolta della saliva
- 1 bustina trasparente
- 1 etichetta
- 1 libretto di istruzioni per l'uso

### ISTRUZIONI PER L'ESECUZIONE DEL PRELIEVO E LA SPEDIZIONE DEL CAMPIONE AL LABORATORIO

Il prelievo della saliva viene generalmente effettuato nel primo mattino, prima della pulizia dei vostri denti, prima di mangiare, bere o procedere al trucco. Se il prelievo viene effettuato durante la giornata, accertarsi che sia passata almeno un'ora dall'ultima assunzione di cibo o bevande.

1. Scrivere Nome/Cognome e data del prelievo sull'etichetta e attaccarla sulla provetta. La corretta identificazione del campione è fondamentale per l'identificazione in laboratorio.



2. Lavarsi bene le mani con acqua e sapone poiché si potrebbe andare a contaminare il campione di saliva prelevato.

3. Togliere il tappo della provetta e sputare direttamente nel tubo. Evitare di toccare con le mani la bocca del tubo.

4. Riempire il tubo almeno per 3/4 e accertarsi che il tappo sia fermo e applicato bene. Riporre il campione nella bustina trasparente e conservare in frigorifero a una temperatura di 4°C.

5. Chiamare il numero di telefono 0143.72.206 per il ritiro dei campioni oppure spedire i campioni, tassativamente a temperatura refrigerata, secondo le istruzioni del fornitore.

### USO PREVISTO

Il presente dispositivo medico-diagnostico in vitro deve essere utilizzato esclusivamente per eseguire il prelievo salivare per effettuare il Test "Salivary DHEA ELISA", così come definito dal presente foglietto illustrativo.

Ogni altro utilizzo è da ritenersi vietato. La ditta FARMACA SRL non si farà carico di eventuali responsabilità per utilizzi non consentiti nel presente foglio di istruzioni d'uso.

### PRECAUZIONI

Non usare il kit oltre la data di scadenza. La scadenza è indicata nell'etichetta posta sul retro della confezione. Tutti i campioni prelevati dai pazienti devono essere debitamente smaltiti. FARMACA SRL si occuperà personalmente dello smaltimento dei rifiuti sanitari, adottando le precauzioni standard normalmente osservate per le sostanze costituenti pericolo microbiologico. Se si hanno dubbi riguardanti l'utilizzo del presente kit di prelievo, contattare immediatamente FARMACA SRL-Laboratori Di Analisi e Ricerca (Tel. +39 0143.72.206).

Il presente dispositivo non può essere riutilizzato. Conservare a temperatura ambiente, in luogo asciutto protetto dai raggi solari. L'integrità delle confezioni e dei componenti del kit garantisce la loro sterilità. Le confezioni del kit devono essere aperte solo immediatamente prima del loro utilizzo.